


Процедура обновление программного обеспечения «Пони-Флюоро Альфа»



Запускаем приложения C:/Alfa/Alfa_jre7 используя иконку на рабочем столе. После запуска приложения на экране появится главное окно системы «Альфа» (Рис.1).

НОМЕР	КАРТ.	ФИМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО	ДАТА	ПОЛ	ДАТА РОЖДЕ.	Ч.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	DVD	ДОЗА
1	1805	ВАСИЛЕНКО	Анатолий	Анатолевич	2008-01-16	МУ	1934-01-01	1	Норма		
2	1821	ВАСИЛЬЕВ	ВХ	ВХ	2009-01-16	МУ	1989-01-01	2	Норма		
3	1867	ВАСИЛЬКОВ	Алла	Анатолевич	2003-08-25	МУЖ	2000-01-01	1	Усиление легочного рисунка в прикорневых зо...		
4	1866	ВАСИЛЬКОВ	Алла	Борисович	2003-08-25	МУ	1978-01-01	1	Усиление легочного рисунка слева. Лезвйскоре...		
5	1922	ВЕРБИЦКАЯ	Анастасия	Антонович	2003-08-28	Ж...	1939-01-01	1	Правосторонний сколиоз грудного отд. позв-к...		
6	1896	ВЕРЛИН	ЕХ	ВХ	2008-01-16	МУ	1953-01-01	2			0
7	1898	ВИЛОНОВА	Анастасия	Ярославна	2003-08-12	Ж...	1952-01-01	1	Легкие эмфизематозны. Легочный рисунок с...		
8	1903	ВИШНЕВСКАЯ	Анастасия	Андреевна	2008-01-16	Ж...	1937-01-01	2	Норма		
9	1730	ВИШНЯКОВА	Анатолий	Вадимовна	2003-08-13	Ж...	1949-01-01	1	Легкие прозрачны. Легочный рисунок усилен д...		
10	1949	ВЛАСКОК	А.	Л.	2003-08-21	МУ	1974-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. Легочный ...		
11	1646	ВОЛКОВ	ВХ	ВХ	2010-08-30	МУ	1966-01-01	1			780
12	1718	ВОЛКОВ	Д.	А.	2003-08-12	МУ	1943-01-01	1	Легкие без паталогически теней. Легочный ри...		0
13	1654	ВОЛКОВА	ГХ	ГХ	2003-08-07	Ж...	1953-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. Легочный ...		0
14	1866	ВОЛКОВА	ТХ	ВХ	2003-08-07	Ж...	1939-01-01	1	Малый пальчатат слева в вероугои. Диффуз...		0
15	1827	ВОЛОДИНА	АХ	ГХ	2003-08-28	Ж...	1935-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. Легочный...		0
16	1946	ВОЛОСОВА	ИХ	ВХ	2003-08-28	Ж...	1953-01-01	1	Легкие эмфизематозны. Легочный рисунок н...		0
17	1760	ГАРИНА	Л.	И.	2008-01-16	Ж...	1950-01-01	2			0
18	1869	ГАУЛИН	АХ	ВХ	2003-08-07	МУ	1976-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. легочный ...		0
19	1824	ГЕРАСИМОВА	В.	И.	2003-08-20	Ж...	1940-01-01	1	Легкие прозрачны. Корни структуры. Легочны...		0
20	1828	ГИНДОЯН	МХ	АХ	2003-08-05	Ж...	1972-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. легочный ...		0
21	1717	ГЛАЗУНОВА	Н.	НХ	2003-08-12	Ж...	1956-01-01	1	Легкие прозрачны, эмфизематозны. Корни ст...		0
22	1882	ГОДИКОВ	ЮХ	П.	2003-08-25	МУ	1949-01-01	1	Легкие прозрачны. Легочный рисунок усилен п...		0
23	1862	ГОДИЦЫН	ИХ	АХ	2003-08-07	МУ	1962-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. легочны...		0
24	1767	ГОЛОВАНОВА	В.	А.	2003-08-18	Ж...	1934-01-01	1	Легкие прозрачны. Легочный рисунок усилен д...		0
25	1881	ГОНЧАРУК	СЕРГЕЙ	ИВАНОВИЧ	2003-08-22	МУ	1923-01-01	1	Легкие прозрачны. Корни легких и плечочный си...		0
26	1932	ГОРНЮСТАЕВ	СХ	ВХ	2003-08-28	МУ	1977-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. Легочны...		0
27	1950	ГОРШКОВ	ИВАН	НХ	2003-08-29	МУ	1947-01-01	1	Легкие эмфизематозны. Легочный рисунок рез...		0
28	1638	ГОРШКОВА	ВХ	АХ	2003-08-06	Ж...	1943-01-01	1	В рентген-авибнет.		0
29	1764	ГОРЯЧЕВ	А.	В.	2003-08-18	МУ	1916-01-01	1	Легкие прозрачны. легочный рисунок усилен д...		0
30	1895	ГРАЦЕНКОВ	А.	Н.	2003-08-12	МУ	1966-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. Л...		0
31	1882	ГРЕЧКИНА	МХ	ВХ	2003-08-08	Ж...	1979-01-01	1	Легкие прозрачны. Легочный рисунок усилеи К...		0
32	1918	ГРИГОРЯН	ГХ	РХ	2003-08-28	МУ	1959-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. легочный ...		0
33	1848	ГРИШИН	НХ	СХ	2003-08-07	МУ	1953-01-01	1	Легочные поля без инфильтративных теней. Л...		0
34	1883	ГРЫЗЛОВА	А.	А.	2003-08-25	Ж...	1945-01-01	1	Легкие прозрачны. Легочный рисунок усилен п...		0
35	1828	ГУБАРЕВ	В.	В.	2003-08-21	МУ	1973-01-01	1	Легкие без инфильтративных теней. Легочный ...		0
36	1595	ГУСАРОВ	ВХ	НХ	2003-08-04	МУ	1968-01-01	1	Эмфизема. Пневмосклероз. Умеренная гиперт...		0
37	А-54	Щербатов	Михаил	Юрьевич	2008-09-03	м	1980-01-01	1			0
38	А-61	Щукина	Ранса	Ивановна	2008-09-30	ж	1957-01-01	1			0
39	А-58	Эгамбердиев	нурбек	эшмаматович	2008-09-20	м	1989-01-01	1			0
40	А-58	Эйбова	Екатерина	Николаевна	2008-09-19	ж	1977-01-01	1			0
41	А-59	Эргашев	сунатулла	хурвеевич	2008-09-20	м	1979-01-01	1	Справа уплотнение межпозвовой и костально...		0
42	А-58	Эргашев	камырауп	назаров	2008-09-20	м	1990-01-01	1			0
43	А-59	Эрданов	Бобомурэд	рашанович	2008-09-20	м	1982-01-01	1			0
44	А-58	Эшорбитов	хужаназар	норжазович	2008-09-20	м	1989-01-01	1			0
45	А-59	Эшматов	азгар	нориевич	2008-09-20	м	1978-01-01	1			0
46	А-58	Эшматов	Файриддин	нориевич	2008-09-20	м	1980-01-01	1			0
47	А-58	Эшуплатов	Алла	Борисович	2008-09-20	м	1974-01-01	1			0
48	А-61	Юдин	Анастасия	Борисович	2008-09-30	м	1965-01-01	1			0
49	А-54	Юраков	Анатолий	Борисович	2008-09-03	м	1969-01-01	1			0
50	А-57	Юркин	Людмила	Борисович	2008-09-17	ж	1964-01-01	1			0
51	А-55	Яковлев	Олег	Борисович	2008-09-04	м	1965-01-01	1			0
52	А-56	Яковлева	Лариса	Борисович	2008-09-16	м/б/5	2000-01-01	1			0
53	А-56	Яковлева	Оксана	владиславовна	2008-09-05	ж	1964-01-01	1			0
54	А-56	Якубова	альфия	футуовна	2008-09-16	ж	1970-01-01	1			0
55	А-55	Якудина	Юлия	Алексеевна	2008-09-04	ж	1962-01-01	1			0
56	А-55	Ярыз	Дмитрий	Геннадьевич	2008-09-04	м	1973-01-01	1			0
57	А-60	Яровенко	Елена	савовна	2008-09-24	ж	1967-01-01	1			0

Рис. 1. Главное окно системы

В главном окне системы активируем кнопку «Настройки системы» расположеную в правом нижнем углу рабочего стола системы . Кнопка всегда доступна пользователям. После нажатия кнопки «Настройки системы» появляется окно «Настройки и установки» (Рис.2).

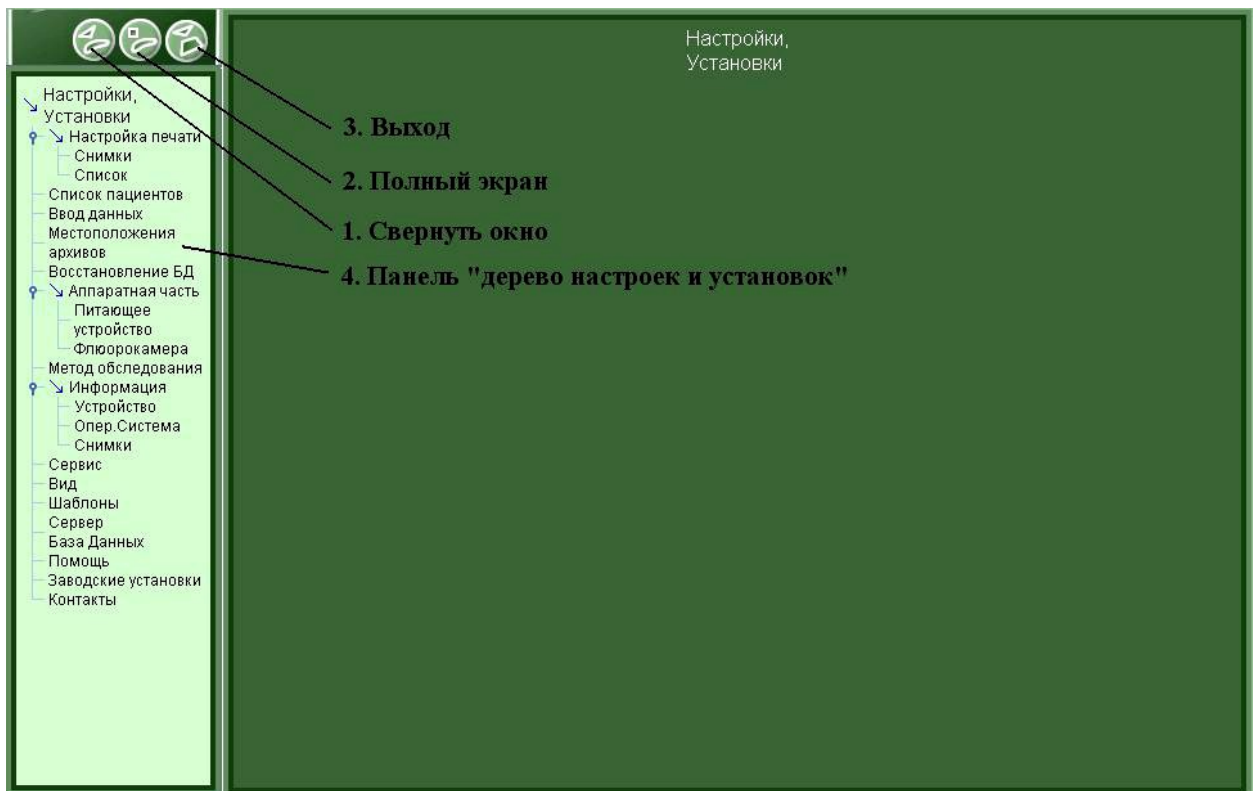


Рис.2. Окно «Настройки, Установки»

В окне **«Настройки, Установки»** на панели **«дерево настроек и установок»** активируйте информационную строку **«Заводские установки»**.

Дерево настроек и установок работает следующим образом. Однократное нажатие на информационную строку приводит к появлению на правой панели нового окна с требуемыми настройками.

После активации информационной строки **«Заводские установки»** на правой панели откроется окно **«Сохранение и восстановление заводских установок»** (Рис.3).

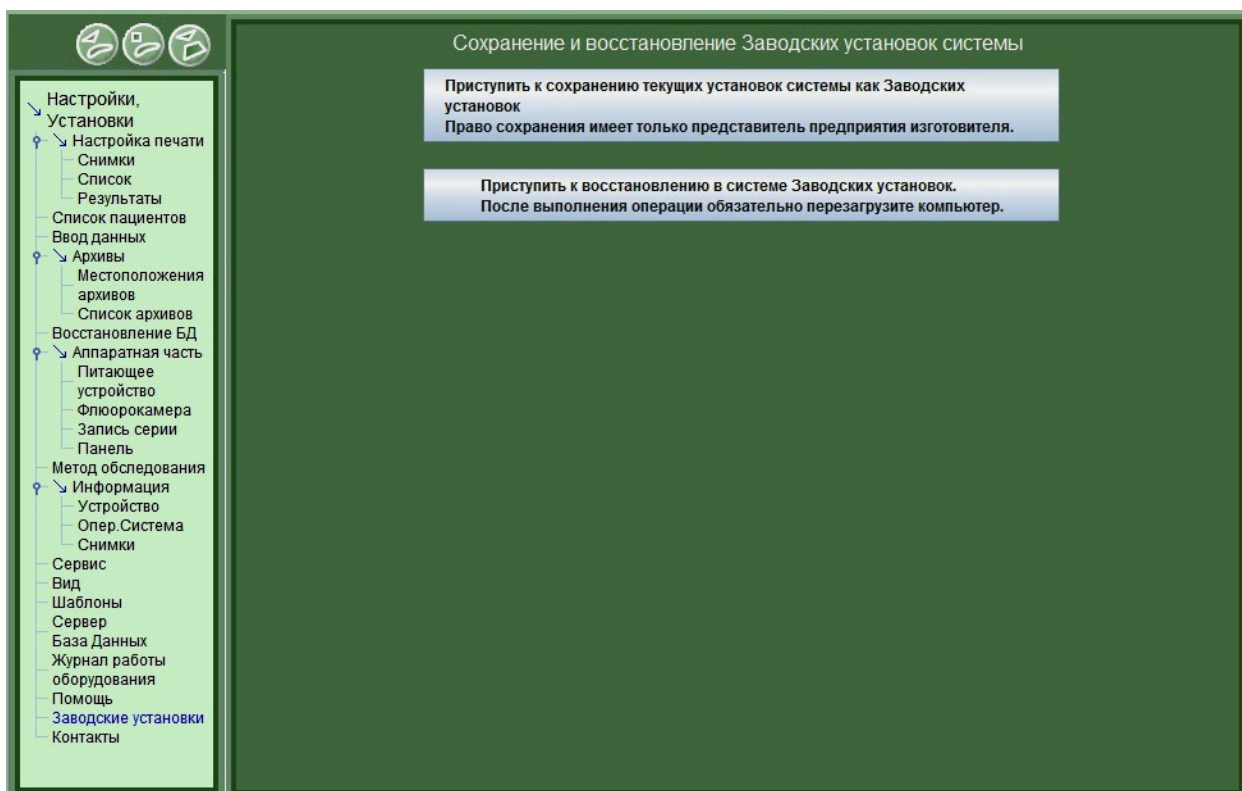


Рис.3. Окно «Сохранение и восстановление заводских установок»

В окне «Сохранение и восстановление заводских установок» необходимо активировать закладку «Приступить к сохранению текущих установок системы как Заводских установок. Право сохранению имеет только представитель предприятия изготовителя».

После активации закладки в окне системы появится окно «Подтвердите процедуру сохранения Заводских установок» (Рис.4).

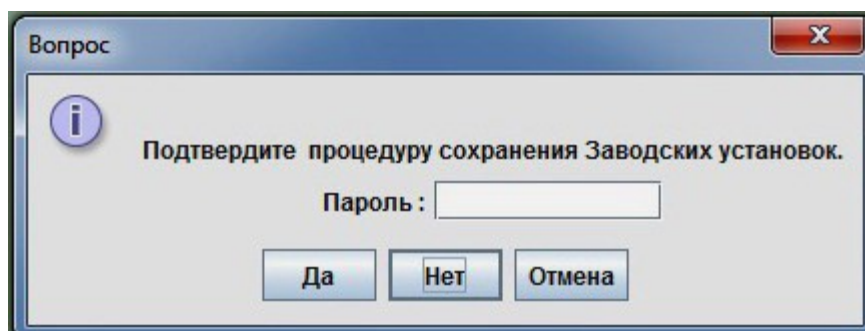


Рис.4. Окно «Подтвердите процедуру сохранения Заводских установок»

Для продолжения процедуры в окне (Рис.4) необходимо ввести пароль, разрешающий выполнение процедуры. Паролем является набор из 8-и цифр, соответствующий текущему году, месяцу и дню. Например: если сегодня **17 января 2014 г.**, то необходимо ввести пароль **20140117** и нажать кнопку «Да» (Рис.5).

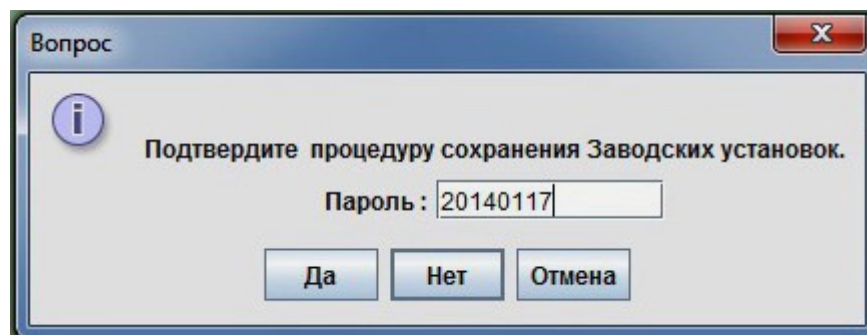


Рис.5. Окно ввода пароля

После нажатия кнопку «Да» (Рис.5) и правильно введенном пароле система выведет сообщение «**Сообщение системы! Процедура сохранения Заводских установок завершена**» (Рис.6).

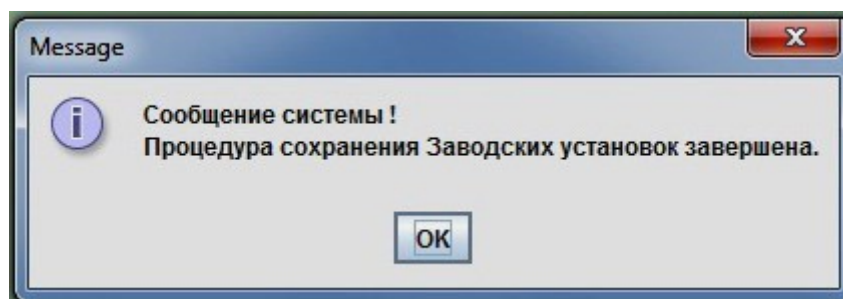



Рис.6. Окно «Сообщение системы»

В окне «**Сообщение системы!**» нажать кнопку «**ОК**» (Рис.6).

Далее выключить программу «Пони-Флюоро Альфа» и запустить заново с помощью приложения `C:/Alfa/Alfa_jre7` используя иконку  на рабочем столе и продолжайте работать как работали.